

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ РОСТОМЕРОМ МП «ЗДОРОВЬЕ» 200 ВДА (50; Р) 310x360 «У» + Wi-Fi

Весы с электронным ростомером предназначены для измерения веса и роста человека, а также для вычисления индекса массы тела (ИМТ) с выводом значений измеренных данных на информационный дисплей. Далее информацию можно использовать в двух вариантах: печати данных на термопринтере, либо в вести персональный учет на устройстве с ОС Android в программе «Фитнес Контроль».

Принцип работы и конструкция:

Когда человек встает на платформу, стараясь сохранить неподвижность в течение короткого времени, происходит измерение роста и веса с вычислением ИМТ (индекса массы тела) в автоматическом режиме. Вся информация отображается на индикаторной панели стойки ростомера. Опционально может быть подключен принтер для печати результатов измерения с отметкой даты и времени измерения. Медицинские весы **соответствуют ГОСТ OIML R76 – 2011 и включены в Реестр** медицинской техники РОССИИ, регистрационное удостоверение №ФСР 2012/13611.

Диапазон измерения:

Рост.....от 30 см до 201 см
 Вес.....от 1.0 до 200.0 кг
 Время измерения.....не более 10 сек

Погрешность измерения:

Рост
 до 100см..... +/- 5 мм
 от 100 до 200см..... +/- 2 мм
 Вес в диапазоне 1.0-200.0 кг..... +/- 50 г

Важно!

Безопасно для любой прически: используется бесконтактный метод измерения роста.



В режиме ожидания показывается температура помещения (°C).
 В рабочем режиме - вес, рост, ИМТ

Завод-изготовитель «МИДЛ» гарантирует работоспособность весов в течение 1 года с обязательным оформлением гарантийного талона.

Весы поставляются в двух упаковках: грузоприемная платформа и основная стойка ростомера.

Работа программы "Фитнес контроль"


Скачайте на устройство с операционной системой Андроид установочный файл "fitness.apk" и запустите его. По окончании установки появится пиктограмма "Фитнес контроль" на дисплее устройства. Далее идет стандартная идентификация устройства с ОС Андроид с Wi-Fi каналом весов.

Работа с программой.

После запуска программы на дисплее будет запрос пароля работы с журналом записей взвешиваний. Вы можете ввести ваш персональный пароль (только цифры, как правило, не больше 5 знаков).

Информация о текущем взвешивании:

- Информация о текущем росте
- Индекс массы тела на настоящий момент (ИМТ).
- Кнопка записи текущих показателей в базу данных (при нажатии кнопки в базе появляется новая строка со значениями текущих показаний)
- Кнопка выхода из программы.
- Кнопка просмотра журнала взвешиваний.

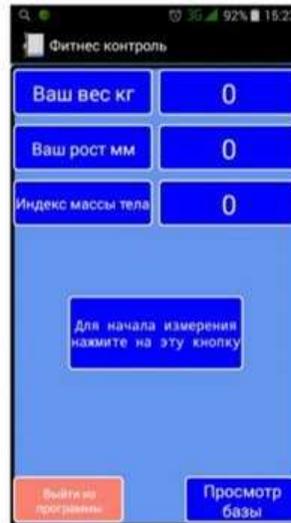


ВАЖНО:

- На устройстве с ОС Андроид канал Wi-Fi должен находиться в активном состоянии.
- Устройство должно находиться не далее 10 метров от весов.
- Программа "Фитнес контроль" должна быть запущена не менее, чем за 10 сек перед взвешиванием.
- Если в устройстве с ОС Андроид канал Wi-Fi выключен, не требуется специально входить в настройки, чтобы его включить – при запуске программы канал активизируется автоматически, а после выхода из программы также автоматически отключится. Но если перед включением программы канал Wi-Fi был активен, то при выходе из программы ничего не изменится, и канал будет продолжать работу.

Для просмотра журнала взвешиваний нажмите стрелку перехода на страницу базы данных (журнал взвешиваний).

Журнал взвешиваний

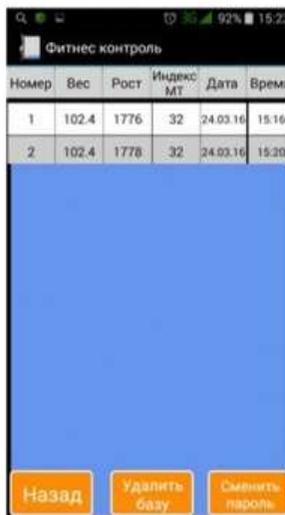

Информация в базе данных.

После просмотра вернитесь на главную страницу программы и, если вы закончили измерения, нажмите на кнопку выхода из программы. Программа закроется, но все изменения в журнале будут сохранены, и Вы можете в любой момент просмотреть историю, даже находясь вблизи весов.

ВАЖНО:

Если потребуется очистить данные базы и начать ведение заново требуется нажать кнопку "Удалить базу" и после запроса на подтверждение и ввода пароля пользователя, база будет безвозвратно очищена от данных.

